



スロープ

スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。


床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

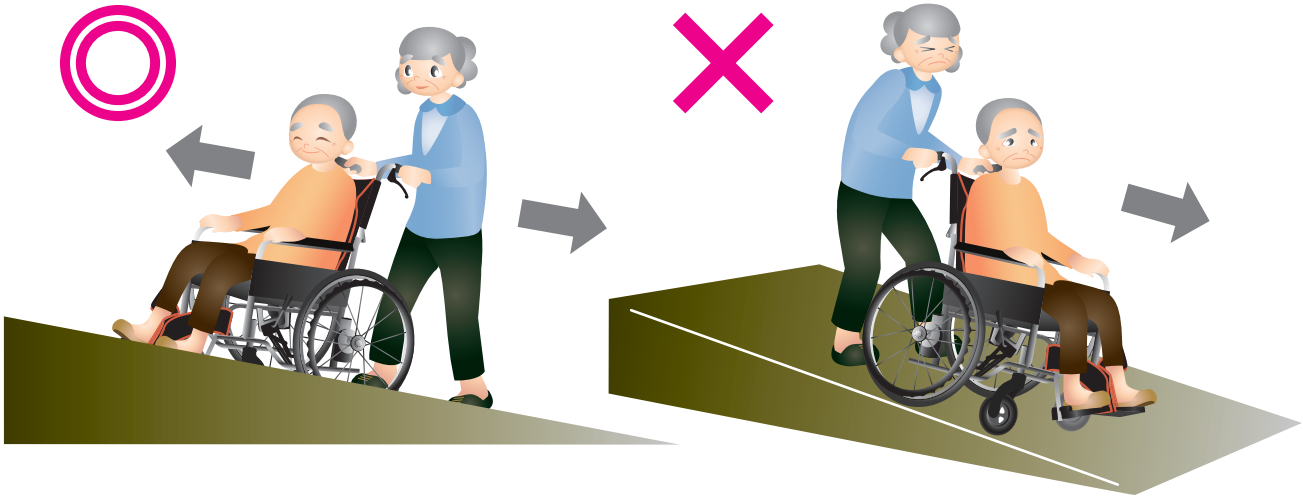

スロープの選び方

※適用傾斜角度は車いすの種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ


移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

段差の高さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
スロープの長さ												
65cm	Green	Yellow	Purple									
70cm	Green	Yellow	Purple									
85cm	Green	Yellow	Purple									
87.5cm	Green	Yellow	Purple									
100cm	Green	Yellow	Purple									
120cm	Green	Yellow	Purple									
125cm	Green	Yellow	Purple									
135cm	Green	Yellow	Purple									
150cm	Green	Yellow	Purple									
165cm	Green	Yellow	Purple									
175cm	Green	Yellow	Purple									
200cm	Green	Yellow	Purple									
205cm	Green	Yellow	Purple									
240cm	Green	Yellow	Purple									
245cm	Green	Yellow	Purple									
255cm	Green	Yellow	Purple									
285cm	Green	Yellow	Purple									

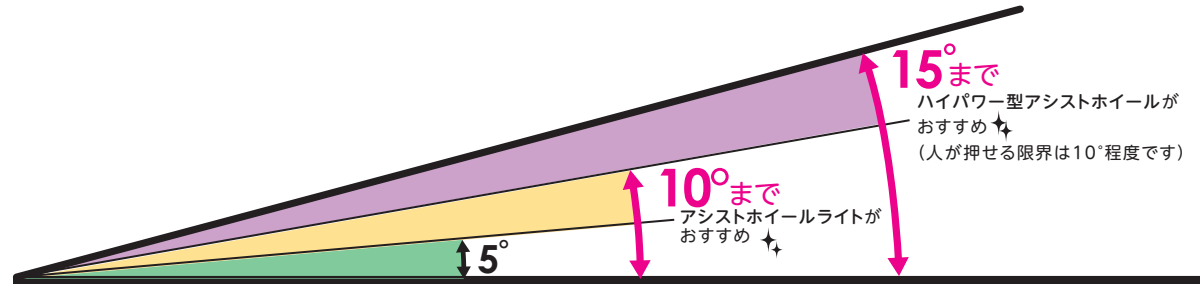

ダンスロープライト・スリム

ダンロップホームプロダクツ

R-85SL 材質: グラスファイバー FRP
R-125SL ~ R-285SL: カーボンファイバー FRP



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品


スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

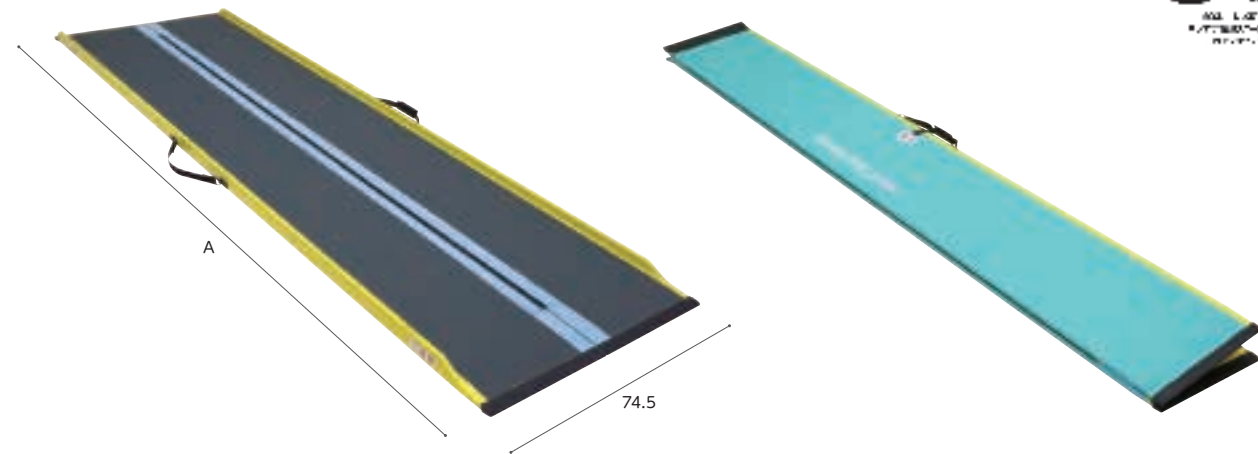


より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。エッジ (高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm) により脱輪の危険性を低減。
※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-85SL	85	約4	28-0973-1	00532-000022	円	円	円	円
R-125SL	125	約5	28-0974-1	00532-000021	円	円	円	円
R-165SL	165	約7	28-0975-1	00532-000020	円	円	円	円
R-205SL	205	約9	28-0976-1	00532-000019	円	円	円	円
R-245SL	245	約11	28-0977-1	00532-000018	円	円	円	円
R-285SL	285	約13	28-0972-1	00532-000017	円	円	円	円

ダンスロープ ライト

ダンロップホームプロダクツ

材質: カーボンファイバー

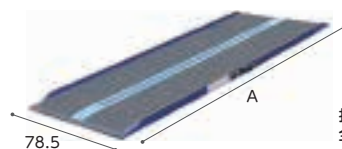

折り畳み時
全幅 39cm



両端の落下防止エッジで、より安全に。(S-85には落下防止エッジがついていません)
軽量で、移動の多い場合も携帯しやすいタイプです。最大荷重300kg。軽くても丈夫なカーボンファイバー製。

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
S-85	85	約4	28-0920-1	00532-000013	円	円	円	円
S-125	125	約6	28-0921-1	00532-000012	円	円	円	円
S-165	165	約8	28-0922-1	00532-000011	円	円	円	円
S-205	205	約10	28-0923-1	00532-000010	円	円	円	円
S-255	255	約14	28-0924-1	00532-000016	円	円	円	円



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品


販売品

情報

ケアスロープ

材質：FRP+アルミ

ケアメディックス

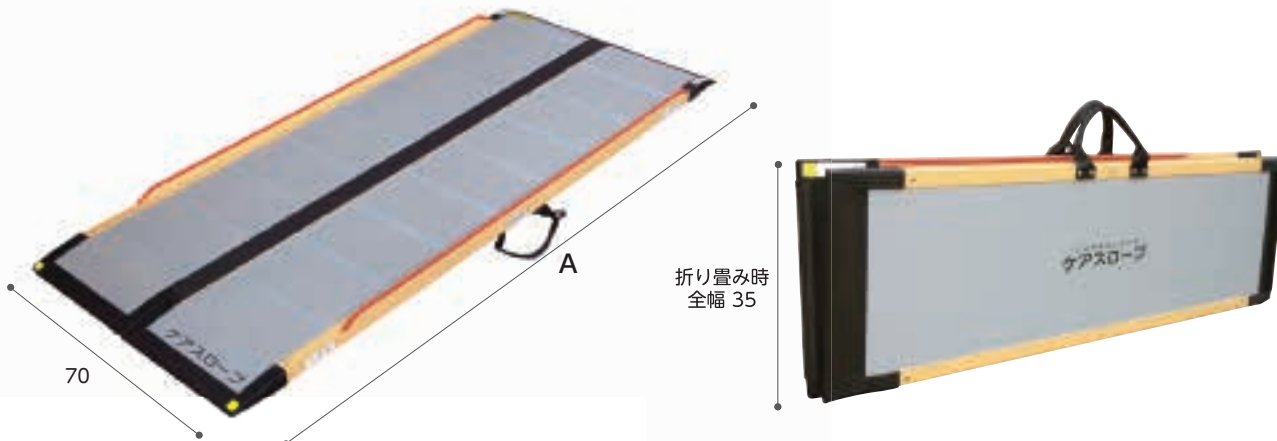

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約3	28-0979-1	00093-000015	円	円	円	円
CS-100	100	約5	28-0980-1	00093-000016	円	円	円	円
CS-120	120	約6	28-0981-1	00093-000017	円	円	円	円
CS-150	150	約8	28-0982-1	00093-000018	円	円	円	円
CS-175	175	約9	28-0983-1	00093-000019	円	円	円	円
CS-200	200	約10	28-0984-1	00093-000020	円	円	円	円
CS-240C	240	約12	28-1015-1	00093-000021	円	円	円	円
CS-285C	285	約15	28-1092-1	00093-000038	円	円	円	円

STEP 1



- ・ 介助者の状況を確認し、選定してください。
- ・ 段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

《CS-175》
玄関に約20cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能であり、転倒を防止し介助負担を軽減するために選定。

《CS-240C》
玄関に約30cmの段差があり、間口が71cmの為、設置可能で脱輪防止エッジがあり車いすが安全に移動できるスロープとして選定。

STEP 2

- ・ 日本家屋に多い狭い間口・場所でも設置可能な、幅狭設計です。



- ・ アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く、丈夫で安全に走行することができます。

- ・ 下端部までエッジが無いので、狭い場所で車いすが直角に乗り入れしやすい設計です。

STEP 3

- ・ 収納しやすい自立設計です。
- ・ 様々な段差に応じて長さを選択できる豊富なラインナップを取り揃えております。



- ・ スロープの先端までアルミ加工を施すことにより、設置時にしっかりと固定できます。

STEP 4



- ・ 設置の際は必ず上端が4cm以上かかっていること、ガタツキがないこと、走行面に異物がないことを確認したうえでご使用ください。

- ・ 走行面にソフトなすべり止めを採用しているため、室内使用時にスロープの上を裸足でも歩いても痛みありません。

エコ段差スロープN

マツ六

置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!



76

商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	円	円	円	円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	円	円	円	円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	円	円	円	円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	円	円	円	円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	円	円	円	円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	円	円	円	円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	円	円	円	円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	円	円	円	円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	円	円	円	円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	円	円	円	円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	円	円	円	円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器


車椅子・
車椅子
付属品

安心のご提案

滑りにくく、足にソフトな素材



端部は安心のラウンド加工

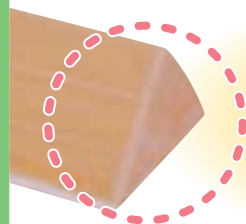

車イスや歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。


安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい
特殊仕様



勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。

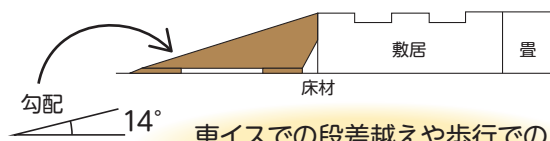

車イスでの段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報